


# miniland nasal care

1

Separare la tapa de las pilas  
Remove the cover of the battery  
Separe a tampa das pilhas  
Séparez le couvercle des piles  
Nehmen Sie den Deckel vom  
Separare il coperchio per le pile  
Zdjąć osłonę na baterie  
Отсоедините крышку отсека

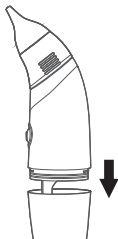


2

Inserte 2 pilas alcalinas (no incluidas)  
Insert two alkaline batteries (not included)  
Insira 2 pilhas alcalinas (não incluídas)  
Insérez 2 piles alcalines (non fournies)  
Legen Sie 2 Alkaline Batterien (nicht mitgeliefert)  
Inserire 2 pile alcaline (non incluse)  
Włożyć 2 baterie alkaliczne (brak w zestawie)  
Вставьте щелочные батарейки 2 (не входят в комплект)




3

Cierre el compartimento de las pilas  
Close the battery compartment  
Feche do compartimento das pilhas  
Fermez le compartiment à piles  
Schließen den Batteriefach  
Chiudere il vano delle pile  
Zamknąć w schowku na baterie  
Закройте отсека для батареек

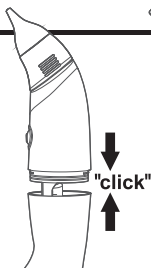


4

Elija la punta de silicona adecuada  
Select the appropriate silicone tip  
Escolha a ponta de silicone adequada  
Choisissez l'embout en silicone approprié  
Wählen Sie die Silikonspitze in der geeigneten Größe  
Scegliere la punta di silicone adeguata  
Teraz należy dobrać silikonową końcówkę odpowiednią  
Выберите соответствующий силиконовый наконечник

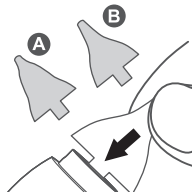

5

Inserte la punta de silicona en la cavidad nasal  
Insert the silicone tip in the nostril  
Insira a ponta de silicone na cavidade nasal  
Insérez l'embout en silicone dans la cavité nasale  
Führen Sie die Silikonspitze in die Nasenhöhle  
Inserire la punta di silicone nella cavità nasale  
Wsunąć silikonową końcówkę do jamy nosowej  
Вставьте силиконовый наконечник в носовую полость

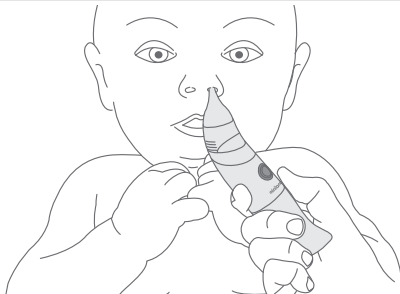

6

Apriete el botón durante algunos segundos  
Press the button for a few seconds  
Aperte o botão durante alguns segundos  
Appuyez sur le bouton pendant quelques secondes  
Drücken Sie einige Sekunden lang auf die Taste  
Tenere premuto il pulsante per alcuni secondi  
Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk  
Удерживайте нажатой кнопку в течение нескольких секунд

